



Kiilto Pro Easydes

Desinfitseeriv puhastusaine



Easydes on etanoolipõhine kasutusvalmis ja kiire toimega desinfitseeriv puhastusaine mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja sagedamini puudutatavate pindade desinfitseerimiseks.

Rakendused

Easydes on tõhus mikrobitsiid ja kasutusvalmis, kiiresti toimiv desinfitseeriv puhastusaine meditsiiniseadmete ja meditsiiniliste pindade desinfitseerimiseks, mis on nakkustõrje seisukohalt kriitilise tähtsusega.

Easydes'i võib kasutada kõikide alkoholiga taluvate materjalide desinfitseerimiseks. See sobib suurepäraselt enamiku plastmaterjalidega, sealhulgas hambaravisektoris kasutatavate materjalidega.

Meditsiiniseade. Professionaalseks kasutamiseks.

Toote omadused

Etanoolil põhinev puhastavate koostisosi sisaldav desinfitseerimisaine. Mikrobitsiidne toime on laia spektriga, kiiresti toimiv, talub hästi orgaanilist koormust. Hävitab tõhusalt mikroobe, viirusi ja seeni. Desinfitseeriv toime saavutatakse ka nähtavalt saastunud pindadel. Eemaldab hästi mustuse ja rasva.

Toote mikrobitsiidne tõhusus on kontrollitud EN- standarditestidega: EN 13727 (bakterid), EN 13697 (bakterid, seened, pärmid), EN 13624 (pärmid), EN 14348 (tuberkuloos ja mükobakterid), EN 14476 (adeno- ja noroviirused), EN 14561 (bakterid), EN 14562 (seened, pärmid), EN 14563 (mükobakterid ja tuberkuloos), EN 16615 koos One System Basic-wipes ja Easydes Wipes.

Kasutusjuhend


Kasutusvalmis lahendus. Doseerimine: Niisutage Easydes'iga lappi/korduvkasutatavat pühkimislappi, arvestage, et vedelikku on piisavalt, et niisutada desinfitseerimist vajavate seadmete pinda. Pühkige pind põhjalikult ja hoolikalt. Enamasti ei ole eelpesu ega loputamine vajalik. Kui desinfitseerimisaine on aurustunud ja pind on kuivanud, on desinfitseerimine toimunud.

One System Basic puhastuslapi dosaatoriga: kasutage niisutatud puhastuslapi 28 päeva jooksul (EN16615).

Märkus

Järgige desinfitseeritavate meditsiiniseadmete ja -vahendite tootjate antud juhiseid.

Clostridium difficile epideemiate korral on soovitatav kasutada Erisan Oxy+ desinfitseerimisainet, kuna etanoolil põhinevate toodetega ei ole võimalik eoseid kahjutuks teha.

Koostis	Toimeaine	Toime			
	Etanool	60 p-%	Biotsiid.		
	Tertsiaarne butanool	< 2 %	Denatureerimisagens		
	Kvaternaarne ammoniumkloriid	< 0,5 %	Biotsiid, puhastavad omadused.		
	Alküülamiin	< 0,5 %	Biotsiid.		
Muu koostis	etanool 55–60 massiprotsenti, tert-butanool < 2%, kvaternaarne ammoniumkloriid < 0,5%, alküülamiin < 0,5%				
Toote pH	10.0 Nõrgalt leeliseline				
Säilitamine	3 aastat toatemperatuuril.				
Välimus ja lõhn	Läbipaistev vedelik, etanooli lõhn				
Tootjariik	SOOME				
Kasutamise ja keskkonna ohutus	<p>Easydes'i puhastava desinfitseerimisainega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada aadressil asiakaspalvelu@kiilto.com ja kohalikule meditsiiniseadmetega tegelevale asutusele.</p> <p>BPR: PT 2 ja PT 4. Kasutage biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugege alati märgistust ja tootekirjeldust.</p> <p>Ohutusjuhised toote ohutuskaardil.</p> <p>Pakend on valmistatud PE-HD plastist, mis on keskkonnasõbralik, täielikult taaskasutatav materjal, mida võib hävitada põletamise teel. Vedelik on biolagunev. Kasutatud salvrätikud hävitatakse haiglahäätmetena.</p>				
Pakendi suurus/Tootekood	Müügiühik	Tootekood	GTIN	GTIN (müügiühik)	Märkus
	3 x 5 l	8083	6417964080834	6417964485301	Asendab toodet 8082 Easydes 5 l
	6 x 500 ml	8081	6417964080810	6417964482447	
					
Lisateave	Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com .				